磁気誘導ループ接続方法



① コンセントにさす

- ①本体の設置場所を決める。
- ②コンセントにさす



②ドラム式ループアンテナ

- ①会場の周りをドラム式ループアンテナに囲む
- ②ドラム式の差し込み口にさす







③ 本体とドラム式差し込み口にさす

- ①ケーブルを本体にさす
- ②ドラム式の差し込み口にさす











ケーブル





4 有線マイクをさす

①有線マイクを本体の「マイク1」、「マイク2」にさす



有線マイク






⑤ 本体の電源をONする



⑥ 無線マイクをONする


- ①無線マイクをONする(赤点灯)
- ②チューナー 緑点灯確認
- ③マイクテスト確認(試聴確認)
- 4 有線マイクもテスト確認
- ⑤運用開始



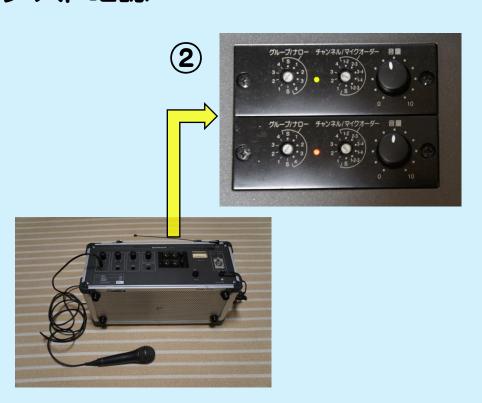


番外編 無線マイクのチャンネル

- ①無線マイクのグループ・チャンネル確認
- ②本体のチューナーのグループ・チャンネル確認
- ③同じグループ・チャンネルであることを確認 (2本のマイクの場合はグループ・チャンネルが異なる事) 同じグループ・チャンネルだと途切れ途切れになります

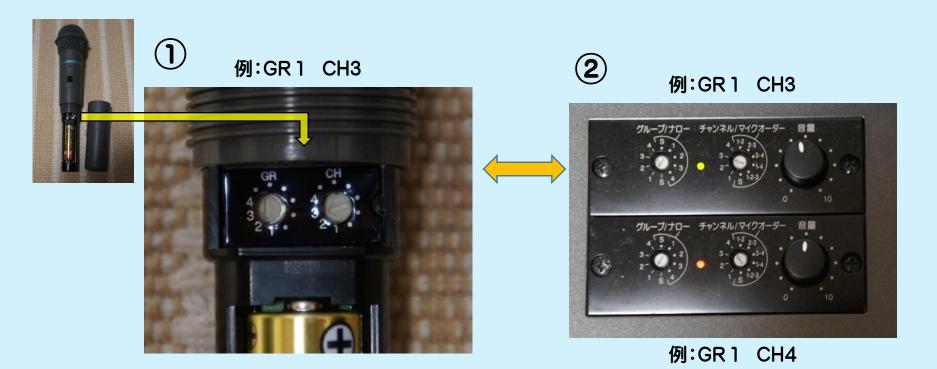

簡易 磁気誘導ループ接続方法

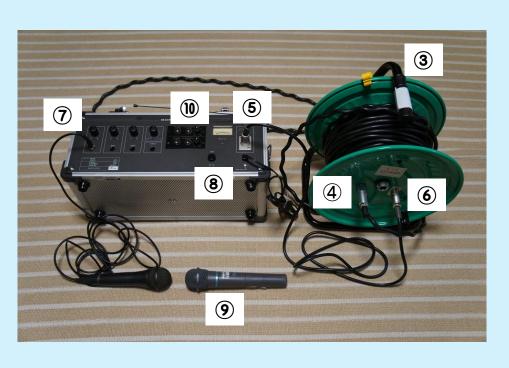

- ①本体の設置場所を決める。
- ②コンセントにさす
- ③会場の周りをドラム式ループアンテナ に囲む
- 4ドラム式の差し込み口にさす
- ⑤ケーブルを本体にさす
- ⑥ケーブルをドラム式の差し込み口にさす
- ⑦有線マイクを本体の「マイク1」または 「マイク2」にさす
- ⑧本体の電源をONする(緑点灯)
- ⑨無線マイクをONする(赤点灯)
- ⑩チューナー 緑点灯確認
- ①無線マイクテスト確認(試聴確認)
- 12 有線マイクもテスト確認
- 13運用開始